


بیمارستان کوثر سمنان

راهنمای نحوه ورود و کاربری پکس پیوند داده ها

۱- ابتدا مرورگر Chrome را باز کرده و در Address bar آدرس پکس پیوند را به این صورت وارد میکنیم:

192.168.85.17

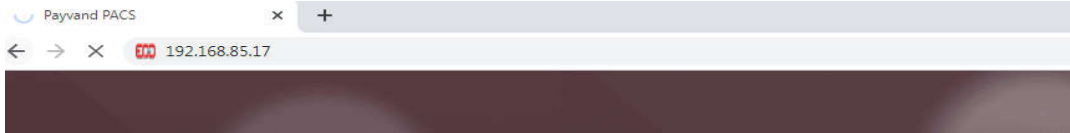

۲- در صفحه باز شده مطابق تصویر زیر در قسمت (ورود بیمارستان) نام کاربری و رمز عبور را بصورت زیر وارد میکنیم:

Password : doc

User name: doc



۳- در صفحه باز شده با استفاده از فیلترهای زیر میتوان تصاویر بیمار مورد نظر را جستجو کرد.

Patient Id = کد شناسایی بیمار Modalities = بر اساس دستگاه تصویربرداری Study Date = بر اساس تاریخ تصویر برداری

۴- با کلیک بر روی نام بیمار تصاویر بیمار باز میشود. عملکرد برخی ابزارهای کاربردی به شرح ذیل میباشد

تبدیل صفحه نمایش به قسمتهای مختلف و نمایش نماهای مختلف			تبدیل صفحه نمایش به قسمتهای مختلف و نمایش نماهای مختلف	
با نگه داشتن کلید سمت چپ موس و حرکت به سمت بالا میتوان Zoom out و Zoom in			نمایش کاتها بصورت فیلم با تنظیم سرعت پخش	
با نگه داشتن کلید سمت چپ موس میتوان تصویر را جابجا کرد			در نمای Compare با این گزینه محل Cut نمایش داده میشود	
میتوان با استفاده از این ابزار بصورت ذره بین یک نقطه را بزرگنمایی کرد			با استفاده از این گزینه میتوان حالتهاى مختلف نمایش تصویر را انتخاب کرد	
چرخش تصویر			ابزار اندازه گیری طول و زاویه	

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان کوثر سمنان